

사용자설명서
Multi-Fix Hip Guard

제조원 : (주)올소테크
대구광역시 동구 울암로 78 (울암동)
(Tel) 053-314-7016 (Fax) 053-314-7017

사용목적:

신체 (허리, 무릎, 목 등) 의 일부분을 압박, 고정하는 지지 기능이 있는 기구. 캐스팅 테이프 (Castion tape)와 치과용 부목을 포함하되, 받혀주거나 지지하는 기능이 없는 것을 제외한다

가. 사용 전 준비사항

(1) 제품 외관 상의 이상 유무를 확인한다.

나. 사용방법

- (1) 허리 치수에 맞게 중앙부에 위치한 벨크로 길이를 조절한다.
- (2) 좌측 벨크로 벨트를 허리에 압박될 수 있도록 하복부에 위치시킨 후 우측 벨크로를 당겨서 원하는 위치에 부착시켜 골반을 압박, 고정하여 지지한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

(1) 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

3. 사용 시 주의사항

가. 사용 시 주의사항

- (1) 반드시 본 제품의 사용방법을 숙지한 후 사용해야한다.
- (2) 제품의 이상 유무를 사용 전에 반드시 확인해야한다.
- (3) 사용자 임의로 제품을 변형해서 사용해서는 안된다.
- (4) 사용 중 제품에 변형이 발생했을 경우 사용하지 말아야한다.
- (5) 다음의 경우에는 사용하지 말아야한다.
 - 오염이 되어 있는 경우
 - 파손이 되어 있는 경우
- (6) 사용시 제품에 무리한 힘을 가하지 말아야한다.
- (7) 세탁기 사용을 금한다.
- (8) 사용목적 이외의 사용을 금지한다.
- (9) 착용 후 발진 또는 고통이 수반될 경우 사용을 즉시 중단하고 의사와 상의한다.
- (10) 본 제품의 사용은 전문의의 지시에 따라 사용되어야하며, 사용방법이나 압박기간 등을 임의로 사용하였을때, 이상이 발생할 수 있다.

나. 유효기간 : 해당없음

다. 보관 조건 및 저장방법

실온의 건조한 곳에서 보관한다.

 본 제품은 '의료기기'이므로 의료기기 취급자 이외에는 판매 및 절대 사용할 수 없습니다.

	Caution		Do not reuse
	Consult instructions for use		Catalogue Number
	Non Sterile		Bach Code
	Date of manufacture		Manufacturer
	EC Representative		