

사용자설명서

Multi-Fix Mono Fixation System

제조사 : (주)올소테크
 대구광역시 동구 울암로 78 (울암동)
 (Tel) 053-314-7016 (Fax) 053-314-7017

사용목적:

파손된 십자인대 재건 시 연조직이나 인대를 뼈에 고정시키는데 사용되는 기구

가. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- ② 사용 전에 반드시 멸균하여 사용하도록 한다.

권장 멸균법은 다음과 같다.

- 멸균방법(멸균기준): 습열멸균(ISO17665-1, 2)
- 멸균 조건 : 134°C, 20~30분

나. 사용방법

- ① 골절된 부위와 형태에 따라 적절한 기구를 선택한다.
- ② 골절 형태에 따라 기구를 변형한다.
- ③ 골절된 부분을 해부학적으로 복구한다.
- ④ 가이드핀으로 기구와 뼈를 일치시킨 후 구멍을 뚫는다
- ⑤ 금속골고정재를 이용하여 체외고정기구와 뼈를 고정시킨다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 깨끗하게 세척한 후, 완전히 건조시켜 실온의 건조한 곳에 보관한다.
- ② 환자의 수술 후 치료기간동안 감염예방을 위한 소독을 실시하여야 한다.


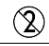




사용시 주의사항

1. 사용시 주의사항

- ① 본 제품은 사용 전 반드시 멸균되어야 한다.
- ② 핀 구멍 및 볼트의 삽입부분에 이물질 침투에 유의해야 한다.
- ③ 모든 연결부분의 고정력 손상을 방지하기 위하여 적정 공구의 사용을 금해야 한다.
- ④ 반드시 전문의에 의해 사용되어야 한다.

2. 유효기간 : 해당사항 없음

 본 제품은 '의료기기'이므로 의료기기 취급자 이외에는 판매 및 절대 사용할 수 없습니다.

	Caution		Do not reuse
	Consult instructions for use	REF	Catalogue Number
	Non Sterile	LOT	Bach Code
	Date of manufacture		Manufacturer
EC REP	EC Representative		