

### 제품정보

품목명: 압박용밴드 신고번호: 제신 18-1487 호

제품명: Multi-Fix OT Band

모델명: OT001-L 외 1건

**사용목적:** 혈액이 괴는 것을 방지하거나 신체의 일부분을 탄력으로 압박 또는 잡아주는 기구. 보온 또는 흘러내림 방지와 찰과 상 예방 및 충격완화 등의 목적으로 사용하는 스포츠 용품은 제외한다.

**작용원리:** 본 제품은 혈액이 괴는 것을 방지하기 위하여 신체의 일부분을 탄력으로 압박하거나 잡아주는 기구이다.

### 사용방법

#### 가. 사용 전 준비사항

- ① 제품 외관 상에 이물질 및 파손 여부를 확인한다.
- ② 사용하고자 하는 부위에 맞는 제품을 준비한다.

#### 나. 사용방법

- ① 수술 부위에 스타키넷을 착용한 후 탈지면을 그 위에 필요한 위치에 올려둔다.
- ② 탈지면 위로 스타키넷을 접어서 겹쳐 세 겹으로 겹쳐지게 한다.
- ③ 그 위로 본 제품(압박용 밴드)로 감싸 수술 부위를 압박 및 고정시킨다.

#### 다. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 1회용 이므로, 사용 후 폐기한다. (재사용 불가)

### 사용시 주의사항

#### 가. 사용시 주의사항

- ① 반드시 본 제품의 사용방법을 숙지한 후 사용해야 한다.
- ② 제품의 이상 유무를 사용 전에 반드시 확인해야 한다.
- ③ 다음의 경우에는 사용하지 말아야 한다.
  - 오염이 되어 있는 경우
  - 파손이 되어 있는 경우
- ④ 자격을 갖춘 의료인 외의 사용을 금지한다.
- ⑤ 본 제품의 사용은 전문의의 지시에 따라서 사용되어야 하며, 사용방법이나 압박 기간 등을 임의로 하여 사용하였을 때, 이상이 발생할 수 있다.
- ⑥ 사용목적 이외의 사용을 금지한다.

#### 나. 유효기간 : 해당사항 없음

#### 다. 보관 조건 및 저장방법

실온의 건조한 곳에서 보관한다.



사용설명서 숙지(참조)

제 조 사 : 주식회사 올스테크  
제조번호 : 제769호  
소재지 : 대구광역시 동구 울암로 78  
연 락 처 : 053-314-7016 [orthotech@orthotech.co.kr](mailto:orthotech@orthotech.co.kr)  
Web <http://www.orthotech.co.kr>



 (주)올스테크

OTIFU-181487(1)\_190910