

### 제품정보

품목명: 환자고정보조대 신고번호: 제신 17-1134 호

제품명: Traction Kit

모델명: C-BS111

**사용목적:** 환자 진료 또는 주사 시에 움직이지 못하도록 잡아주는 기구·기계. 천으로 만든 재료는 제외한다.

**작용원리:** 본 제품은 환자 진료 또는 수술 시에 환자의 자세를 유지 또는 고정하기 위해 사용되는 환자고정보조대로서 정형외과 수술 시 골절부위를 이음줄(별도제품)로 묶어 수술대에 고정하기 위한 제품으로, 골절된부위로 인해 주변 조직 등의 손상을 방지하도록 다리를 들어올려 일정 자세를 유지하도록 고정해준다.

### 사용방법

#### 가. 사용 전 준비사항

- ① 제품의 파손 및 이상 여부를 확인한다.
- ② 사용 전에 반드시 세척하여 사용해야 한다. 당사는 초음파 세척을 권장한다. 세척 후에는 세척 상태를 확인해야 하며, 필요시 세척을 반복한다.
- ③ 사용 시 전문의는 수술 과정 및 기구 조작에 관한 내용에 대해 충분히 숙지하고 있어야 한다.

#### 나. 사용방법

- ① 클램프(Clamp, BS009)를 수술대와 같은 기구의 지지대에 적당한 위치에 고정한다.
- ② 전문의의 판단 하에 골절된 뼈를 정렬시켜 고정하기 위해서 트랙션 바(Traction bar, BS008)를 클램프 내 체결부에 연결시켜 위치에 맞게 조절한다.
- ③ 위치가 조정된 트랙션 바의 고정을 위해 클램프 안전핀을 손으로 회전시키고 단단히 고정되었는지 확인한다.
- ④ 멸균 처리된 이음줄 같은 의료용 처치 재료를 이용하여 골절된 뼈를 집어서 함께 트랙션 바 내 연결고리에 묶어 고정시킨다.
- ⑤ 트랙션 바 핸들을 손으로 돌려 조절하여 이음줄에 묶인 골절된 뼈를 조정 및 정렬시킨다.
- ⑥ 고정한 후, 기기와 환자의 골절부의 고정 상태를 확인한다.
- ⑦ 정렬된 골절부에 대해 수술 처치한다.

#### 다. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 구성품을 분리하여 깨끗하게 세척한 후, 완전히 건조한다.
- ② 실온의 건조한 한 곳에 보관한다.

### 사용시 주의사항

#### 가. 사용시 주의사항

- ① 사용 전 반드시 세척해야 한다.
- ② 사용 시 과도한 힘을 주어서는 안 된다.
- ③ 시술자는 시술 전에 제품의 손상 여부를 확인해야 한다.
- ④ 반드시 전문의에 의해 사용되어야 한다.

나. 유효기간 : 해당사항 없음

다. 보관조건 및 저장방법: 실온의 건조한 곳에서 보관한다.



사용설명서 숙지(참조)

제 조 사 : 주식회사 올소테크  
제조번호 : 제769호  
소 재 지 : 대구광역시 동구 울암로 78  
연 락 처 : 053-314-7016 [orthotech@orthotech.co.kr](mailto:orthotech@orthotech.co.kr)  
Web <http://www.orthotech.co.kr>



 (주)올소테크

OTIFU-171134(1)\_190910