

제품정보

품목명: 압박용밴드 신고번호: 제신 16-954 호

제품명: <Multi-Fix> EASY BAND STOCKING

모델명: X-EN-001

사용목적: 혈액이 괴는 것을 방지하기 위하여 신체의 일부분을 탄력으로 압박하거나 잡아주는 기구

성능: 혈액이 괴는 것을 방지하거나 신체의 일부분을 탄력으로 압박 또는 잡아주는 기구. 튜브 손잡이가 달려있어 손쉽게 착용이 가능함

사용방법

가.사용전 준비사항

- 1) 자기 신체에 맞는 규격을 준비하여 과다한 장력이 가해지지 않도록 한다.
- 2) 외관 및 제품 포장에 손상의 이상유무를 확인 후 이상이 있을 경우 사용하지않는다.
- 3) 사용자는 사용방법을 대해 숙지후 사용하도록 한다.
- 4) 착용 전 사용시 주의사항에 숙지하여야 한다.
- 5) 반지, 시계 등을 벗어 놓는다.
- 6) 상처부위는 붕대나 거즈로 덮은 후에 압박 의복을 착용해야 한다.
- 7) 풀린 실이나 고리는 잘라내지 않는다. 의복에 구멍이나 줄이 생겨 장력이 떨어질 수 있다.

나.사용방법 및 조작순서

- 1) 환자의 압박할 부위의 둘레를 측정후 제품을 선택하도록 한다.
- 2) 제품의 위아래를 구분하여 끼워 넣는다.
- 3) 둘레 및 수축기 혈압을 기준으로 피부 압력을 참조하여 피부에 가해지는 압력을 예측하도록한다.
- 4) 말단부를 압박밴드 입구에 위치시킨후 모든 족(수)지가 입구내로 들어갔는지 확인한다.

착용방법

- 1) 착용할 부위에 실리콘 링이 관통할수 있도록 별도의 장치가 없도록 한다.
- 2) 제품의 링 중앙으로 착용할 손 발을 삽입한다.
- 3) 링 외부에 있는 튜브손잡이를 몸쪽으로 당겨 압박 스타킹을 펼친다.
- 4) 착용후 이상유무를 확인한 후 실리콘 링을 제거한다.
- 5) 압박 스타킹이 멍치는 곳 없이 전체적으로 잘 착용되었는지 확인한다.
- 6) 움직이지 못할 정도의 압박이 강할 시 규격을 바꾸거나, 새로이 착용한다.

벗는방법

- 1) 위쪽에서부터 감아 내려 천천히 벗는다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 제품의 훼손이 발생하였을 경우, 구매처 또는 제조처에 문의하여 사용하도록 한다.
- 2) 심한 훼손이 발생하였을 경우, 사용하지 말고 폐기 처분하도록 한다.
- 3) 제품을 화기 근처에서 보관하지 않는다.
- 4) 직사광선을 피해 건조한 곳에서 보관한다.

라. 세탁방법

1) 세탁기간

- 매일 착용시 땀과 먼지 등의 이물질이 울사이에 끼이게 되어 탄력이 저하되고 탄력사가 손상되므로 매일 세탁하는 것이 탄력을 좋게 하고 수명을 연장합니다.

2) 세탁시 물의 온도

- 세탁시 물의 온도는 최대 섭씨 40도(°C)를 넘기지 말아야하면 30도(°C)의 온도가 가장 적당하다. 또한 뜨거운 물과 삶는 것은 절대 금지합니다.

3) 세제사용

- 중성세제, 유아용비누 등을 사용하여 세탁하도록 한다. 염소표백제, 섬유유연제, 화학용품 등은 사용하지 않도록 한다.

4) 세탁요령

- 손세탁을 권장하며, 부득이하게 세탁기 사용시 세탁망을 이용하도록 한다.

(드라이크리닝 금지)

- 물에 오래 담가두거나 세탁 시 너무 세게 문지르지 마십시오.

- 세제가 완전히 씻겨 나갈 수 있도록 깨끗한 물로 충분히 헹구어 주십시오.

마. 건조방법

1) 탈수기나 건조기 등 기계건조를 하지 않도록 한다.

2) 마른수건으로 물기를 눌러서 제거하도록 한다.

3) 통풍이 잘되는 바닥에서 자연건조 시킨다.

사용시 주의사항

(1) 주의사항

1) 일회용 이므로 재사용 및 재멸균을 금한다.

2) 제품이 손상되었을 경우 폐기하도록 한다.

3) 압박밴드는 의사의 지시 하에 사용 하도록 한다.

4) 압박밴드 하(상)지의 둘레가 14cm이상 90cm이하 에서만 사용 할 수 있다.

5) 골절 또는 탈구가 있는 환자는 수상 부위가 불안정하기 때문에 압박밴드를 착용 할 때 수상 부위의 원위부를 견인 해주어야 한다.

6) 압박밴드는 환자의 수축기 혈압이 수축기 혈압표에서 추천하는 범위 내에 있을 때 효과가 있다.

7) 압박밴드를 착용 후에도 혈액 순환이 계속되서 혈액이 고이는 경우 압박밴드를 제거해야 한다.

8) 갑작스런 힘을 가하면 정맥류나 부종이 있는 경우 피부 손상이 올 수 있습니다.

유효 기간

제조일로부터 1년



사용설명서 속지(참조)

제 조 사 : 주식회사 올소테크
제조번호 : 제769호
소 재 지 : 대구광역시 동구 울암로 78
연 락 처 : 053-314-7016 orthotech@orthotech.co.kr
Web <http://www.orthotech.co.kr>



 (주)올소테크

OTIFU-16954(1)_190910