

제품정보

품목명: 팽창성부목, 신고번호: 제신16-670호,
제품명: MULTI-FIX TOTAL CARE PACK - AIR
모델명: A-C112

사용목적: 신체(허리, 무릎, 목 등)의 일부분을 압박, 고정하는지지 기능이 있는 기구, 캐스팅 테이프(Casting tape)와 치과용 부목을 포함하되, 받혀주거나 지지하는 기능이 없는 것은 제외한다.

작용원리: 적용부위의 손상시 해당부위를 압박/고정할 수 있는 팽창성 부목이며, 냉온팩이 들어있어 찜질이 가능한 제품

사용방법

가. 사용 전 준비사항

(1) 사용설명서 숙지 후 사용방법 및 조작순서에 따라 사용하도록 한다.

적용부위: Knee, Shoulder, Wrist, Ankle, Arm

나. 사용방법 및 조작순서

(1) 적용부위의 중앙에 오게 제품을 위치시킨다.

(2) 패드에 연결된 끈을 푼다.(냉온팩 사용시 가장자리의 벨크로로 붙어있는 부분을 열고 팩을 넣은 후 사용)

(3) 벨크로가 부착된 끈을 돌려 연결된 패드를 부착한 후 고정한다.

(4) 에어펌프로 적당한 압력이 되도록 바람을 넣어 팽창시켜 더욱 단단하게 고정하고 펌프를 분리한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

(1) 사용 후 벨크로 부분이 손상되지 않도록 유의한다.

사용시 주의사항

(1) 경고

- ① 본 제품은 사용자의 임의변형을 금한다.
- ② 사용중 제품이 변형될 경우 사용하지 않는다.
- ③ 본 제품은 사용목적 이외에는 사용을 금한다.

(2) 사용 전 주의사항

- ① 반드시 사용설명서를 숙지한 후 사용하도록 한다.
- ② 제품의 외관의 파손 유무를 반드시 확인한다.
- ③ 제품의 밀봉 상태를 확인한다.
- ④ 다음의 경우에는 사용하지 않는다.
 - 1) 부목이 오염되어있는 경우
 - 2) 부목이 파손되어있는 경우
- ⑤ 냉온팩 사용시 과열하거나 과냉시키지 않는다.
- ⑥ 피부손상 방지를 위해 파우치에 냉온팩을 넣어 사용한다.
- ⑦ 쿨팩의 경우 사용 사용전 1시간이상 냉동실에 보관한다.
- ⑧ 핫팩의 경우 중간온도로 설정후 20초 이하로 세팅후 부풀 때까지 5초간격으로 가열한다.

(3) 일반적 주의

- ① 사용 전 제품 및 포장 상태가 양호 한지 확인한다. (포장의 파손유무/라벨의 부착유무)
- ② 사용 전 제품의 규격을 반드시 확인한다.
- ③ 세탁기 사용을 금한다.

(4) 적용상의 주의

- ① 본 제품은 사용목적 이외에는 사용하지 않는다.
- ② 착용 후 발진 또는 고통이 수반될 경우 사용을 중단하고 의사와 상의한다.
- ③ 제품에 무리한 힘을 가하지 않는다.

유효기간 : 해당 사항 없음

보관 조건 및 저장방법: 실온의 건조한 곳에서 보관한다.



사용설명서 숙지(참조)

