

### 제품정보

품목명: 압박용밴드 신고번호: 제신 16-1460 호

제품명: <Multi-Fix> EASY BAND

모델명: C-ES11

**사용목적:** 혈액이 고이는 것을 방지하거나 신체의 일부분을 탄력으로 압박 또는 잡아주는 기구. 보온 또는 흘러내림 방지와 찰과 상 예방 및 충격완화 등의 목적으로 사용하는 스포츠 용품은 제외한다.

**성능:** 압박용밴드를 압박할 부위를 정한후 밴드 길이에 맞게 적절한 압박으로 감아서 고정시킨다. 신체 일부분을 압박용밴드로 고정함.

### 사용방법

- 1) 자기 신체에 맞게 준비하여 과도한 장력이 가해지지 않도록 한다.
- 2) 외관 및 제품 포장에 손상의 이상유무를 확인 후 이상이 있을 경우 사용하지않는다.
- 3) 사용자는 사용방법을 대해 숙지후 사용하도록 한다.
- 4) 착용 전 사용시 주의사항에 숙지하여야 한다.
- 5) 상처부위는 거즈로 덮은 후에 압박 밴드를 감아야 한다.

#### 나. 사용방법 및 조작순서

- 1) 환자의 압박할 부위의 확인 후 제품을 선택한다.
- 2) 제품을 개봉하여 압박 부위를 감싸준다.

#### 다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 제품의 훼손이 발생하였을 경우, 구매처또는 제조처에 문의하여 사용하도록 한다.
- 2) 심한 훼손이 발생하였을 경우, 사용하지말고 폐기 처분하도록 한다.
- 3) 제품을 화기 근처에서 보관하지 않는다.
- 4) 직사광선을 피해 건조한 곳에서 보관한다.

#### 라. 세탁 및 건조방법

본 제품은 일회용 제품이므로 따로 세탁 및 건조할 필요가 없다.

### 사용시 주의사항

#### 1. 주의사항

- 1) 일회용 이므로 재사용 및 재멸균을 금한다.
- 2) 제품이 손상되었을 경우 폐기하도록 한다.
- 3) 압박밴드는 의사의 지시 하에 사용 하도록한다.
- 4) 골절 또는 탈구가 있는 환자는 수상 부위가 불안정하기 때문에 압박밴드를 착용 할 때 수상 부위의 원위부를 견인 해주어야 한다.
- 5) 압박밴드를 착용 후에도 혈액 순환이 계속해서 혈액이 고이는 경우 압박밴드를 제

거해야 한다.

6) 갑작스런 힘을 가하면 정맥류나 부종이 있는 경우 피부 손상이 올 수 있습니다.

유효 기간

제조일로부터 1년



사용설명서 속지(참조)

제 조 사 : 주식회사 올소테크  
제조번호 : 제769호  
소재지 : 대구광역시 동구 울암로 78  
연 락 처 : 053-314-7016 [orthotech@orthotech.co.kr](mailto:orthotech@orthotech.co.kr)  
Web <http://www.orthotech.co.kr>



 (주)올소테크

OTIFU-161460(1)\_190910