



1. 사용목적

본 제품은 충전제 역할을 하는 본시멘트를 빠르고 간편하게 믹싱하기 위해 사용된다.

2. 사용목적

- 1) 보관 중인 제품 포장지에 파손유무, 멸균상태를 유지하는지 확인한다.
- 2) 제품 및 포장상태에 손상이 없는 지 확인한다.
- 3) 제공되는 사용설명서를 잘 읽고 이해하여 숙지하도록 한다.

3. 사용 시 주의사항

- 1) 반드시 정해진 용도로만 사용한다.
- 2) 외관 및 내부의 표면에 흠집, 긁힘 등이 육안으로 판단될 경우 사용하지 않는다.
- 3) 제품에 충격이 가해진 경우 이상 유무를 반드시 확인하여야 하며 이상발생 시 사용하여서는 안된다.
- 4) 해당 제품은 일회용 멸균 의료기기이므로 재사용 및 재멸균은 금지한다.

4. 사용방법 및 조작순서

- 1) 반드시 정해진 용도로만 사용하고 이외의 용도로는 사용을 금한다.
- 2) 본시멘트를 주입하고자 하는 골강내 (또는 표면)을 세척한다.
- 3) 본시멘트를 믹싱볼에 넣은 후 흡입펌프를 연결하여 진공상태를 만든다.
- 4) 손잡이를 돌려 파우더와 리퀴드를 적당한 점도로 믹싱한다.
- 5) 제품을 개봉하여 도구를 이용해 본시멘트를 필요한 부위에 사용한다.

5. 폐기방법

- 1) 사용 후 분리하여 폐기하도록 한다.

6. 포장구성

- 1) <Multi-Fix> Vaccum Mixer Suringe-S / Lur Lock 2ea/ Tube/ Funnel (Spinal)
- 2) <Multi-Fix> Vaccum Mixer Bowl-B / Spatula/ Tube (Hip&Knee)

7. 유효기간

- 1) 제조일(멸균일)로부터 12개월

8. 저장방법

- 1) 실온보관

9. 일회용 멸균제품

- 1) 본 제품은 일회용 멸균의료기기이므로 의료기기 취급자 이외에는 판매 및 사용할 수 없습니다.

10. 제조원

- 1) ㈜올소테크, 대구시 동구 울암로 78
- 2) TEL. 053-314-7016, Fax. 053-314-7017

	Caution		Do not reuse
	Consult Instructions for use		Batch Code
	Sterile		Manufacturer
	Date of manufacture	-	

사용방법

Multi-Fix Vaccum Cement Mixer Bowl - B (Hip&Knee)



1. 제품이상 유무 확인후 안전한 공간에서 제품을 개봉한다.



2. 동봉된 튜브를 Bowl과 진공기계에 연결한다.



3. 믹싱할 시멘트 재료를 넣는다.



1. 제품이상 유무 확인후 안전한 공간에서 제품을 개봉한다.



2. 동봉된 튜브를 Bowl과 진공기계에 연결한다.



3. 믹싱할 시멘트 재료를 Funnel을 이용하여 쉽게 넣는다.



4. 상단마개를 덮고 공기를 빼 진공상태로 만든다



5. 의료용시멘트가 잘 혼합될수있도록 손잡이를 돌려준다.



6. 혼합된 의료용 시멘트를 뚜껑을 열어, 동봉된 스피출러를 이용해 사용하도록 한다.



4. 상단마개를 덮고 공기를 빼 진공상태로 만든 뒤 의료용 시멘트가 잘 혼합될 수 있도록 손잡이를 돌려준다.



5. 연결된 튜브를 해제후, 동봉된 투아락을 연결하도록한다. 이후 아레텍 일원을 잡고 반시계방향으로 돌려 시멘트를 주출할 수 있도록한다.



6. 투아락을 이용하여 시멘트를 원하는 양만큼 주출하여 사용하도록 한다.