



의료용 시멘트 진공 혼합기

# Multi-Fix Vacuum Mixer



## INTRODUCTION

의료용 시멘트를 혼합 및 삽입하는 기구로 외부의 진공 펌프를 연결하거나 또는 진공관을 이용해 진공상태에서 시멘트를 혼합하는 장치로 밀봉 포장된 멸균 제품이며, 본 시멘트를 이용한 관절치환술(인공관절, 슬관절 및 척추관절)을 시술할 때 고정용으로 사용되는 본 시멘트를 골강내에 삽입하는 기구로 사용된다

판매처 : (주) 올소테크 대구광역시 동구 울암로 78

 ORTHOTECH

## 의료용 시멘트 진공 혼합기

# Multi-Fix Vacuum Mixer

### 사용시 주의사항

- 1) 반드시 정해진 용도로만 사용한다.
- 2) 외관 및 내부의 표면에 흠집, 긁힘 등이 육안으로 판단될 경우 사용하지 않는다.
- 3) 제품의 충격이나 바닥에 낙하하였을 경우 제품의 이상 유무를 확인후 사용하여야 하며 이상이 있을시 판매처 또는 제조처에 물건을 교체한다.
- 4) 해당 제품은 일회용 멸균 의료기기이므로 재사용 및 재멸균은 금지한다.

### 사용 방법

- 1) 반드시 정해진 용도로만 사용하고 이외의 용도로는 사용을 금한다.
- 2) 본시멘트를 주입하고자 하는 골강내 (또는 표면)를 세척한다.
- 3) 본 시멘트를 믹싱볼에 넣은후 흡입펌프를 연결후 진공상태를 만든다.
- 4) 손잡이를 돌려 파우더와 리퀴드를 적당한 점도로 믹싱한다.
- 5) 제품을 개봉, 도구를 이용해 본시멘트를 필요한 부위에 사용한다.

### 제품 정보

- 품목명: 의료용 시멘트 혼합기
- 신고번호: 제신 16-189호
- 치료재료코드: E5102083
- 상한금액: ₩114,040 (2016.12)
- 상품명: Multi-Fix Vacuum Mixer
- 모델명: C-A102
- 성능: 사용설명서 참조
- 사용상 주의사항: 사용설명서 참조
- 사용기한: 제조일로부터 1년 까지
- 적용 및 사용목적: 사용설명서 참조
- 멸균방법: EO가스 멸균
- 저장방법: 실온보관
- 제조년월: 별도표시
- 포장단위: 1EA / 1PACK
- 해당 제품은 '의료기기'입니다. 1회용품
- 제조자: (주)올소테크 대구시 동구 울암로78