



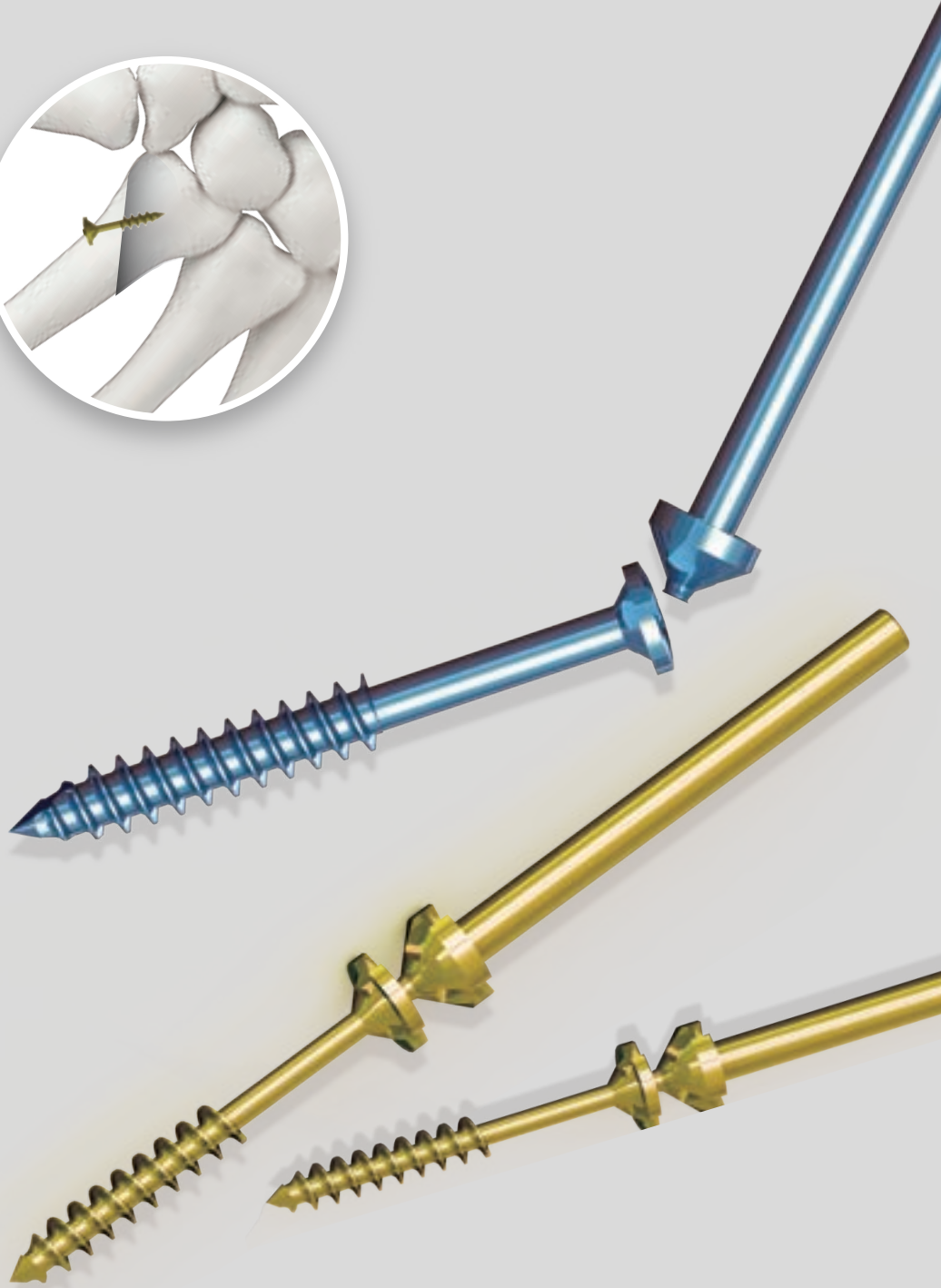

# Baro-Fix™ Snap Off Screw System

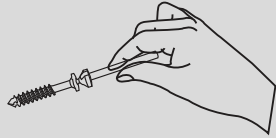


# Snap Off Screw System

| Baro-Fix™ |

## ■ 적응증

1. 발목(Ankle) / 2. 발(Foot) / 3. 발가락(Toe) 4. 손(Hand) / 5. 손목(Wrist) / 6. 손가락(Finger)  
Bone Fracture, Fusion 혹은 Osteotomy(절골술)에 사용하는 내고정용 제품입니다.

티타늄 합금으로 만들어진 골절합용 나사로서 적응증 1~6번의 파손된 뼈를 고정하는 데 사용되도록 고안된 것으로 스크류 삽입 후 스크류 Tip을 분리시켜 고정시킵니다.

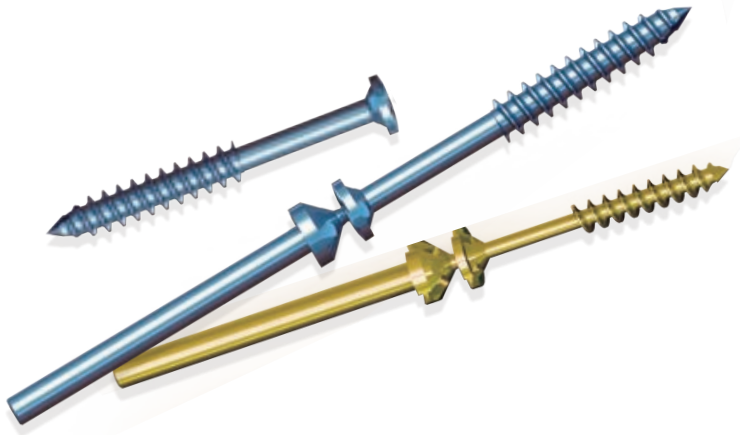

## ■ 장점

01.

안정성

- 생체 적합 원재료 TI-6AL-4V-ELI 사용하여 품질의 안정성 + 우수한 기계적 강도

02.

편의성 +  
신속성

- 파손된 뼈의 고정 및 절골술에 단독 사용 가능

03.

다양한  
선택

- 지름 Ø2.0, Ø2.7로 구성되며 Screw의 전장 길이가 다양하여 다양한 선택 가능
- 얇은 뼈에도 강한 고정력


04.

Self Drilling


- 사용 시 Drilling 불필요
- 대상자의 골밀도나 사용자의 필요에 따라 핸드피스 or 전용 드라이버 선택적 사용 가능

# Snap Off Screw System

Baro-Fix™

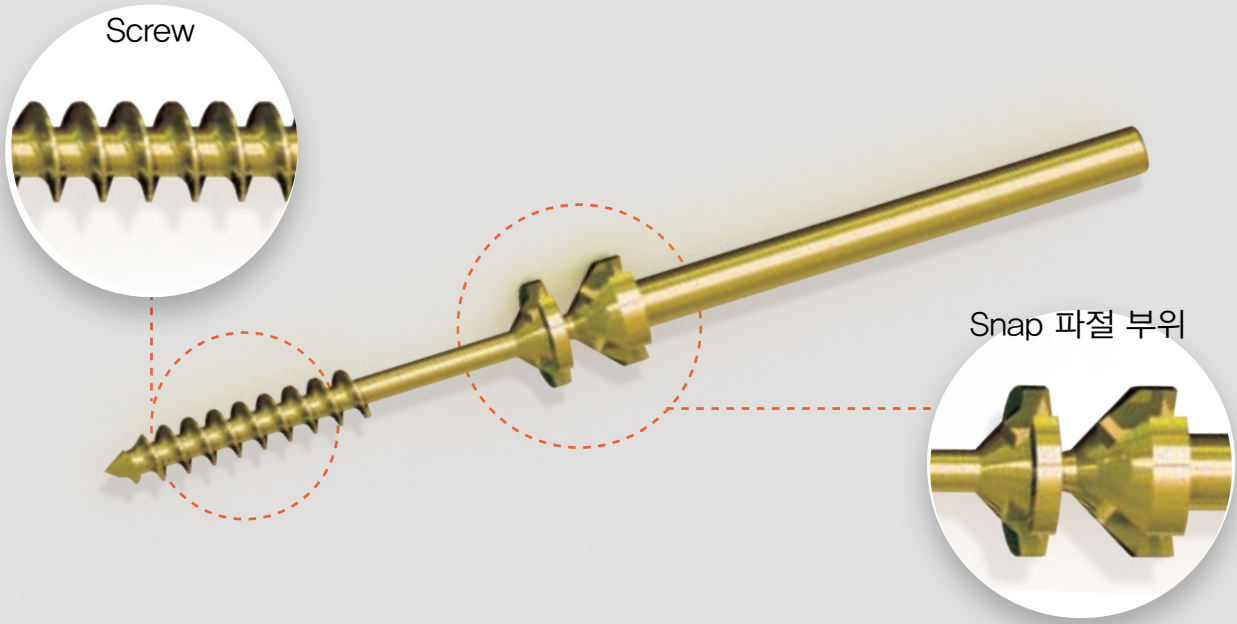

## ■ 사용 방법

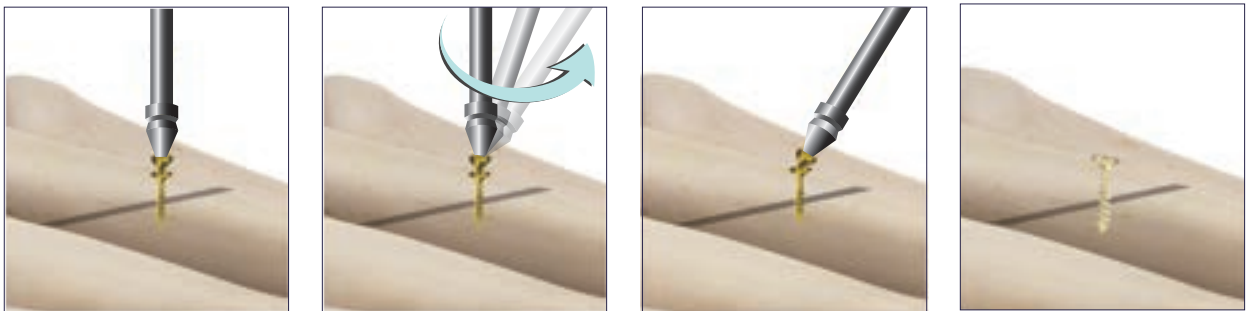


- ✓ 골밀도 낮은 경우 :  
Screw의 Head 부분이 골에 닿을 때 Tip을 흔들어 떼어낸다.
- ✓ 골밀도 높은 경우 :  
Screw의 Head 부분이 최종 포지션에 도달하기 전 Tip을 흔들어 떼어낸다. 이후 최종 포지션에 도달하기 위해 Driver를 Screw의 Head에 연결하여 2차 체결을 진행한다.

## ■ Set List / Implant


### Baro-Fix Snap Off Screw Ø2.0

Cat-No	Spec	Color
SO2010	Ø2.0×10mm	Yellow
SO2011	Ø2.0×11mm	
SO2012	Ø2.0×12mm	
SO2013	Ø2.0×13mm	
SO2014	Ø2.0×14mm	
SO2015	Ø2.0×15mm	
SO2016	Ø2.0×16mm	
SO2017	Ø2.0×17mm	
SO2018	Ø2.0×18mm	
SO2019	Ø2.0×19mm	
SO2020	Ø2.0×20mm	

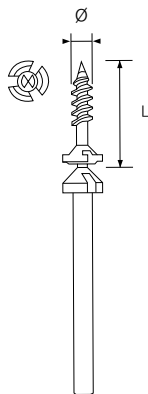


### Baro-Fix Snap Off Screw Ø2.7

Cat-No	Spec	Color
SO2714	Ø2.7×14mm	Blue
SO2716	Ø2.7×16mm	
SO2718	Ø2.7×18mm	
SO2720	Ø2.7×20mm	
SO2722	Ø2.7×22mm	
SO2724	Ø2.7×24mm	

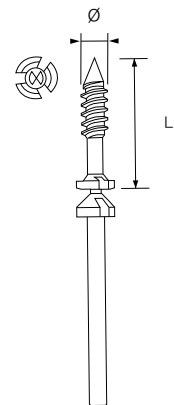

## ■ Set List / Case & Instrument


IS08-02 Ø4.4 Mini Driver Handle

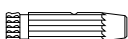


IS05-P44 Snap off screw pick up driver Tip



IT50-02 BARO-Fix Snap Off Screw Spin Case

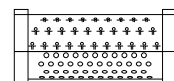

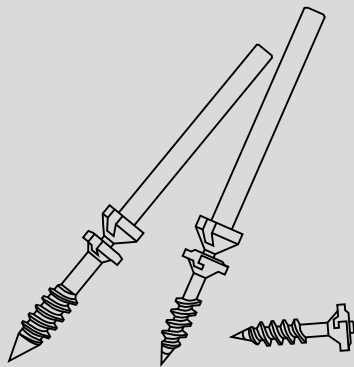

## **Baro-Fix™ Snap Off Screw System**