

MULTI-FIX[®] TOTAL CARE PACK

제품특성&사용목적

- 손상된 부위를 압박/고정할 때 사용하는 부목 냉온팩 사용이 가능함
- 신체(허리, 무릎, 목 등)의 일부분을 압박, 고정하는 지지 기능이 있는 기구

의료기기 품목정보

- 모델명 : A-C111
- 품목분류명 : 부목
- 신고번호 : 제신16-673호



본제품은 의료기기제품으로 식품의약품안전처 승인하에 제조하고 있으며, 사용목적외에 다른용도나 제품의 수정을 금지합니다 .

제품A/S센터 울소테크 T. 053. 314. 7016 / 대구광역시 동구 울암로78

사용방법

- 1 제품준비
- 2 냉온팩 예열 및 예냉
- 3 사용부위안착
- 4 조절끈으로 고정



가. 사용 전 준비사항

- (1) 사용설명서 숙지 후 사용방법 및 조작순서에 따라 사용하도록 한다.
- 적용부위: Knee, Shoulder, Wrist, Ankle, Arm

나. 사용방법 및 조작순서

- (1) 적용부위의 중앙에 오게 제품을 위치시킨다.
- (2) 패드에 연결된 끈을 푼다.
(냉온팩 사용시 가장자리의 벨크로로 붙어있는 부분을 열고 팩을 넣은 후 사용)
- (3) 벨크로가 부착된 끈을 돌려 연결된 패드를 부착한 후 고정한다.

제품특징



냉온팩으로 시원하고 따뜻하게 사용가능

지퍼부착으로 편리하게 사용

탈부착 및 길이 조절가능한 조절끈으로 체형에 맞게 사용 용이

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- (1) 사용 후 벨크로 부분이 손상되지 않도록 유의한다.



사용시 주의사항

- (1) 경고
 - ① 본 제품은 사용자의 임의변형을 금한다.
 - ② 사용중 제품이 변형될 경우 사용하지 않는다.
 - ③ 본 제품은 사용목적 이외에는 사용을 금한다.
- (2) 사용 전 주의사항
 - ① 반드시 사용설명서를 숙지한 후 사용하도록 한다.
 - ② 제품의 외관의 파손 유무를 반드시 확인한다.
 - ③ 제품의 밀봉 상태를 확인한다.
- (3) 일반적인 주의
 - ① 사용 전 제품 및 포장 상태가 양호하지 확인한다.
(포장의 파손유무/라벨의 부착유무)
 - ② 사용 전 제품의 규격을 반드시 확인한다.
 - ③ 세탁기 사용을 금한다.
- (4) 적용상의 주의
 - ① 본 제품은 사용목적 이외에는 사용하지 않는다.
 - ② 착용 후 발진 또는 고통이 수반될 경우 사용을 중단하고 의사와상의한다.
 - ③ 제품에 무리한 힘을 가하지 않는다.
- (4) 다음의 경우에는 사용하지 않는다.
 - 부목이 오염되어있는 경우
 - 부목이 파손되어있는 경우
- ⑤ 냉온팩 사용시 과열하거나 과냉시키지 않는다.
- ⑥ 피부손상 방지를 위해 파우치에 냉온팩을 넣어 사용한다.
- ⑦ 쿨팩의 경우 사용 사용전 냉동실 30분 냉동 후 사용한다.
※냉장실 2~3시간
- ⑧ 핫팩의 경우 전자렌지 중간온도 설정하여 2분이하로 가열 뒤집어서 1분 더 가열하여 사용한다.

MULTI-FIX[®] TOTAL CARE PACK RENEWAL

여러 부위 사용가능

간편 사용 가능



무릎



어깨



허리



손목



발목



팔