

	<h1>사 용 설 명 서</h1>	품목명	점착성투명창상피복재
		모델명	BW0101.001 외 1건
		허가번호	제인23-5308호

■ 사용목적

화상(1도) 및 건조피부 등 피부장벽이 파괴된 부위에 창상의 관리와 보호를 위하여 사용하는 창상피복재

■ 사용방법

1. 사용 전 준비사항

- 1) 제품의 포장 및 파손, 변질 등이 없는지 확인하여 정상적인 제품만을 사용한다.
- 2) 사용 전, 제품의 유효기간을 확인한다.
- 3) 사용 전, 사용설명서를 반드시 숙지한다.

2. 사용방법

- 1) 적용할 부위를 깨끗이 닦는다.
- 2) 적당량을 고르게 도포한다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 본 제품은 일회용 멸균 의료기기이므로, 재멸균 및 재사용을 금지한다.
- 2) 사용 후 적절한 절차에 따라 폐기한다.

■ 사용 시 주의사항

1. 일반적 주의사항

- 1) 사용기간이 경과된 제품은 사용하지 않는다.
- 2) 제품설명서를 숙지한 후 사용한다.
- 3) 재사용 및 재멸균하지 않는다.
- 4) 유효기간이 지난 제품은 사용하지 않는다.
- 5) 제품의 포장이 개봉 또는 파손되어 있는 제품은 사용하지 않는다.

2. 보관시 주의사항

- 1) 고온 및 다습한 장소, 직사광선이 있는 장소를 피해 보관한다.






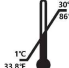


3. 부작용 · 사고 발생 등에 대한 주의사항

- 1) 가려움증(홍조, 염증), 알레르기 반응이나 감염이 있는 경우 전문가와 상의한다.

■ 보관 및 저장방법

통풍이 용이한 실온(1~30℃)에서 직사광선을 피하여 보관한다.

본 제품은 '일회용 의료기기'이므로 재사용을 금지함

제조업소 : (주)올소테크 제조원 주소 : 41061, 대한민국, 대구광역시 동구 침북로 100-4 A동 1층 일부, 2층 일부(동내동) 홈페이지 주소 : http://www.orthotech.co.kr Tel) 053-314-7016 Fax) 070-8250-7017					
	에틸렌옥사이드를 사용하여 멸균함		재사용 금지		패키지가 손상된 경우 사용하지 마시오
	다습한 곳을 피하십시오		직사광선을 피하십시오		온도 한계
	주의		사용 지침 참고 요망		